

REKVISITION
til analyse af sACETYLKOLIN-RECEPTOR antistof
rettet imod den humane receptor
(NPU18343 - ACHRAB)

Fra:

Sendes til:

Neuroimmunologisk Laboratorium

Afsnit 57

Valdemar Hansens Vej 17, indgang 5, 7.sal

Rigshospitalet

2600 Glostrup

Dags dato:

Prøvedato:	
Prøve id-nr:	
Patientnavn:	
Patientens cpr nr:	
Omkostningssted (skal påføres af afdelinger på Rigshospitalet for fakturering – hvem betaler?):	
EAN/GLN-nr. (rekvirentens offentlige faktureringsnr. som skal påføres af alle! – hvem betaler?):	
Evt. vigtig information:	
Svar adresse:	Faktura adresse:

Information: I et serumglas tappes 6 ml blod (Vacuette, serum clot activator, 456089). Husk at vende røret 4 gange. Efter prøvens koagulation centrifugeres glasset ved 2200xg 10 min. ved 4-18°C, og min. 2 ml serum afpipetteres i et cryorør med skruelåg. Husk prøve ID-nr på både glas og rekvisitions-seddel. Hæmolyseret og lipæmisk blod accepteres ikke til analyse, da de kan give falske svar.

Hvis prøverne kommer frem inden for 48 timer, kan de sendes ved stuetemperatur, ellers sendes prøven på tøris. Opbevaring indtil prøve afsendelse ved 4°C. Undgå at sende prøver fredage eller dagen før helligdage.

Prøver analyseres og svar udsendes generelt én gang om ugen. Hvis prøven er førstegangs positiv, analyseres den om med en fortyndingsserie den følgende uge for præcisering af svar. Der kan i visse tilfælde gå op til tre uger før svaret udsendes pga. omkørsel af prøven.

Se endvidere vores hjemmeside: www.ms-research.dk (under Neuroimmunology Laboratory).